

BRUKSANVISNING

Evakueringsstol for trapper Basic



Følg disse trinnene nøye for å bruke evakueringsstolen:



1. Åpne emballasjen og fjern plastdekselet fra evakueringsstolen.
2. Plasser stolen på en horisontal overflate.
3. Hold i håndtaket og løft stolen over med én fot på det svartfargede bakhjulsstolpen.

Dytt bakhjulsstolpen utover med én fot mens du holder i håndtaket.



4. Åpne stolen, og stolen er klar til bruk.
5. Løsne knuten på venstre side av sikkerhetsbeltet. Åpne beltespennen og plasser låshodet på høyre side av sikkerhetsbeltet.
6. Plasser personen som skal flyttes på setet og stram sikkerhetsbeltet.



7. Åpne låsen på håndtaket for å justere høyden på håndtaket. Du skal høre en lyd som indikerer at håndtaket er låst på plass når du trekker håndtaket oppover.
8. Juster nakkestøtten i henhold til hodehøyde, og bruk sikkerhetsbeltet for å sikre hodets posisjon.
9. Skyv stolen på en horisontal flate ved hjelp av alle fire hjul.



10. Ved kanten av trappen, dytt stolen litt fremover slik at du kan skyve de bakre hjulene inn i stolen, og de låses.
11. Hold stolen godt fast. Trekk stolen bakover og la stolen gli langs trappens kanter.
12. Ved enden av trappen, skyv stolen fremover og åpne de bakre hjulene ved å bruke én fot.

Merk: Vær alltid forsiktig når du bruker evakueringsstolen for å sikre en trygg og effektiv evakuering. Vi anbefaler å øve på bruk av stolen i forkant.